

# ACCU-CHEK®

Solo

## COLOCACIÓN CORRECTA DE LA MICROBOMBA

> En 3 simples pasos



1 Colocó la microbomba en una posición tal que la aguja del reservorio se inserte en el cabezal gris de la cánula y queden en un ángulo de 90° o formando una L. Es importante que la microbomba siempre quede paralela al soporte, tal como se muestra en esta imagen.



2 Girá la microbomba con cuidado hasta colocarla en el gancho superior del soporte de bomba. Ejercé una ligera presión para asegurarte de que la aguja del reservorio quede dentro del cabezal gris de la cánula. Escucharás el primer Click.



3 Para finalizar, presioná suavemente la microbomba para que encastre en el gancho inferior del soporte de bomba. Escucharás el segundo Click. Inspecciona los ganchos para asegurarte de que la microbomba se haya fijado correctamente.