

ACCU-CHEK®

Solo

Roche



PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESCONECTA EL BLUETOOTH

Paso 1: Resetear el Administrador de Diabetes

Apagá el Administrador de Diabetes desde el botón on-off y retirá la batería. Luego, presioná el botón on-off durante 5 segundos y volvé a colocar la batería. Finalmente, volvé a encender el Administrador.

Si el problema persiste, continuar al paso 2.

Paso 2: Simular la sustitución del reservorio

Seguí los pasos del Administrador de Diabetes.

Podés utilizar el mismo reservorio que estabas usando, siempre y cuando tenga más de 80 U y menos de 3 días de uso.

Si esto no resuelve el problema, sustituí el reservorio utilizando uno nuevo.

Si el problema continua, comunicate con nuestro equipo de atención al cliente al 0800-333-6365 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 hs.